





Jos potilas ei herää, **SOITA HÄTÄNUMEROON 112.**


Aloita välittömästi painelupuhalluselytys ja pyydä muita tuomaan defibrillaattori.

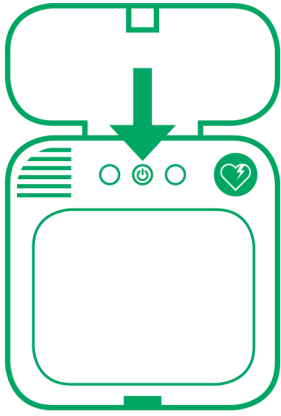


**1.** Avaa defibrillaattorin kansi ja kytke virta.

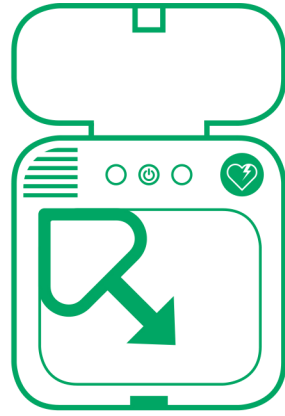


**2.** Ota elektrodit esiin.

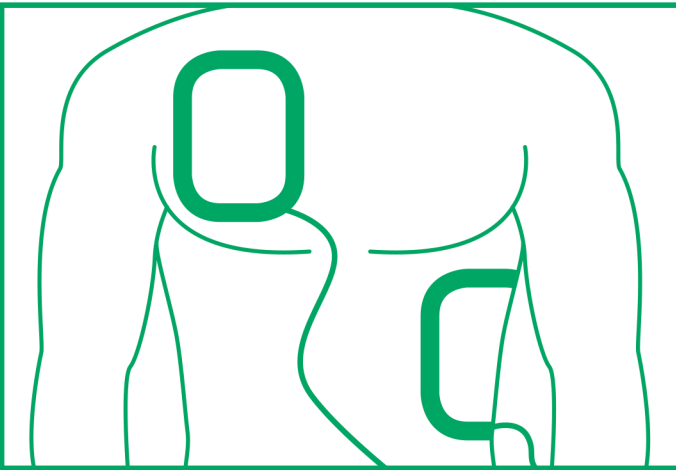

**3.** Kiinnitä elektrodit potilaan rintakehälle. Potilaaseen **EI SAA KOSKEA** sydämen rytmin analysoinnin aikana!

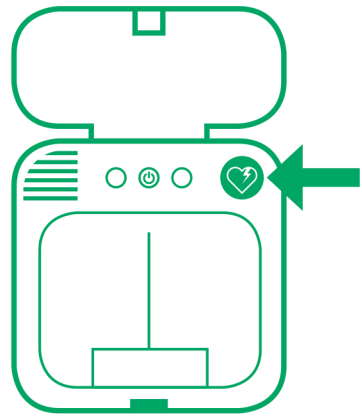

**4.** Paina iskupainiketta, jos kone niin kehottaa. **PYSY IRTI POTILAASTA!**

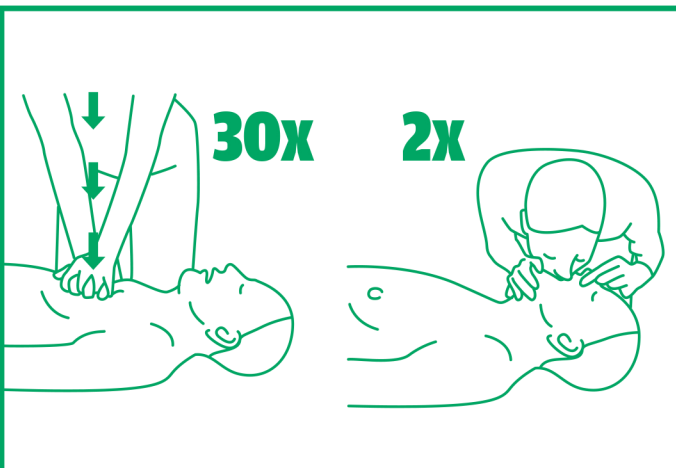

**5.** Jatka painelupuhalluselytystä välittömästi iskun antamisen jälkeen. Seuraa jatkossa koneen antamia ohjeita.

**Voit lopettaa elvytyksen, kun vastuu siirtyy ammattihenkilölle, potilaan hengitys palautuu tai omat voimasi loppuvat.**